

MELISEPTOL® WIPES SENSITIVES

TOALLITAS DESINFECTANTES DE ÁMBITO SANITARIO

Meliseptol® Wipes Sensitive son unas toallitas desinfectante para productos sanitarios y equipos médicos con excelente compatibilidad con todo tipo de materiales, incluso aquellos sensibles al alcohol

CARACTERÍSTICAS

- Rápido y efectivo.
- Toallitas listas para su uso.
- Impregnadas con Melisetpol® Foam Pure.
- Excelente compatibilidad con todo tipo de materiales.
- Bajo contenido en alcohol.
- No deja residuos en las superficies..

INDICACIONES

- Especialmente indicadas para la desinfección de material sanitario y equipos médicos como equipamiento quirúrgico, aparatos de ultrasonidos, bombas de infusión, incubadoras o camas de hospital.
- Posee una excelente compatibilidad con todo tipo de materiales, incluidos aquellos sensibles al alcohol como plástico acrílico y pruebas de ultrasonido.
- No contiene aldehídos alquilaminas y es un excepcional producto multiusos con aroma agradable y discreto.
- Tiempo de exposición: 1 minuto

COMPOSICIÓN

- Cada bote contiene 60 toallitas impregnadas con 300 g de Melisetpol® Foam Pure.
- 100 g de Melisetpol® Foam Pure contienen:
- 17g 1-propanol, 0.23g de cloruro de didecildimetilamonio.
- Excipientes: <5% surfactantes no iónicos, agua purificada.

DATOS FÍSICO-QUÍMICOS

- Apariencia: líquido transparente e incoloro
- Densidad (20°C): ~0.98g/ml
- Punto de inflamación: +31.5 °C
- pH: ~7

EFICACIA MICROBIOLÓGICA

- Meliseptol® Wipes sensitive son efectivas o frente:
- Bacterias (inc. TbB) y hongos (incl. *C. albicans*).
- Virus envueltos: Gripe A, VHC, VHB, VIH, Vacciniavirus.
- Virus no envueltos: Norovirus, Poliomavirus y Rotavirus

Microorganismo	Test	Tiempo exposición
Desinfección de superficies: Bacterias, hongos (<i>C. albicans</i>), virus con envuelta (incl. VHB,VHC, VIH, Vaccinavirus, BVDV) Rotavirus	DGHM/VAH 09/2001 EN 1040 EN 1275 EN 1276 DW/RKI	Cond. limpias: 1 min Cond. sucias: 2 min
Hongos (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624	60 min.
Micobacteria (<i>M. Terra</i>)	EN 14348 EN14563	3 min. 1 min.
Virus de la gripe A	DW/RKI	15 seg.
Rotavirus	DW/RKI	1 min.
Norovirus (MNV)	EN 14476	5 min.
Poliomavirus	DW/RKI	5 min.

DOSIFICACIÓN E INSTRUCCIONES DE USO

- Usar guantes. Los aparatos médicos deben desconectarse antes de su desinfección. Si no es posible, deben tomarse precauciones para asegurarse que el aparato no se pondrá en marcha mientras se lleva a cabo la desinfección.
- Limpiar la superficie a desinfectar con una toallita de Meliseptol® Foam Pure y dejar secar. Esperar a que el tiempo de contacto haya transcurrido. No rociar directamente en las aperturas de los dispositivos médicos.
- No aclarar. Dejar secar completamente.



INFORMACIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

B. Braun está certificado acorde:

- DIN EN ISO 9001 sistema de gestión de calidad
- DIN EN ISO 13485 proporcionar dispositivos médicos y servicios relacionados que cumplan consistentemente los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y servicios relacionados.
- DIN EN ISO 14001 sistema de gestión medioambiental.
- DIN EN ISO 50001 sistema de gestión energética.
- OHSAS 18801 sistema de gestión de salud ocupacional y seguridad.
- El sitio de producción Sempach dispone de certificado GMP (Producción Farmacéutica)

ALMACENAMIENTO

Proteger de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Inflamable.

Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Fecha de caducidad: 2 años

Producto		
Meliseptol® Wipes Sensitives Box	C/12	19582
Meliseptol® Wipes Sensitives Refil pack	C/12	19530