

USO DEL KIT DE DECÚBITO VENTRAL REPOSE® DURANTE UN SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA AGUDA (SDRA)



LA SITUACIÓN

Servicio de reanimación médica y asistencia respiratoria ubicado en el hospital Croix Rousse en LYON

DEFINICIÓN

- Tratamiento de hipoxemia severa durante SDRA
- Técnica simple, eficiente y económica



EFFECTO SOBRE LA FUNCIÓN PULMONAR



- Mejora la oxigenación
- Previene el daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica
- Drenaje de secreciones bronquiales
- Efecto beneficioso sobre la mortalidad en la mayoría de los pacientes hipoxémicos

DISPOSITIVOS

- Un cojín facial de aire para cara / tórax colocado en la parte superior de la cama (Repose® Babytherm)
- Un cojín-cuña de aire para pie/ rodilla colocado en la parte inferior de la cama (Repose® Alivio de Talón)
- Un dispositivo de aire para todo el cuerpo del paciente que redistribuya la presión al sumergir y envolver al máximo las zonas de riesgo (Repose® Sobrecolchón)



TRATAMIENTO - AJUSTE CARA / TORAX

- Levante al paciente en DV en la parte superior del cuerpo para introducir el dispositivo cojín Repose® Babytherm debajo de la sábana.
- Coloque el dispositivo cojín Repose® Babytherm hasta el nivel de la línea mamaria, lo que reduce la presión en la cara y evita la hiperextensión de la cervical.
- La cabeza se gira hacia un lado, lo que garantiza una buena permeabilidad de la vía aérea. El dispositivo cojín Repose® Babytherm así colocado, limitará la presión en mentón, nariz, pómulos.

TRATAMIENTO - AJUSTE PIE / RODILLA


- Levante las piernas inferiores del paciente para introducir el dispositivo cojín-cuña Repose® Alivio de Talón debajo de la sábana. Coloque el dispositivo en la parte inferior de la cama.
- Las rodillas deben descansar sobre el dispositivo cojín-cuña Repose® Alivio de Talón. Esta posición hace posible limitar las posturas viciosas y equinas de los pies manteniendo una posición física.
- Doble las sábanas sin meterlas debajo del colchón (Varios centímetros de juego a cada lado).

MÁS INFORMACIÓN

WWW. REPOSE.ES

CINS-Repose 948 24 23 08 - 672 72 28 48

DISTRIBUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS REPOSE® SOBRE LA CAMA

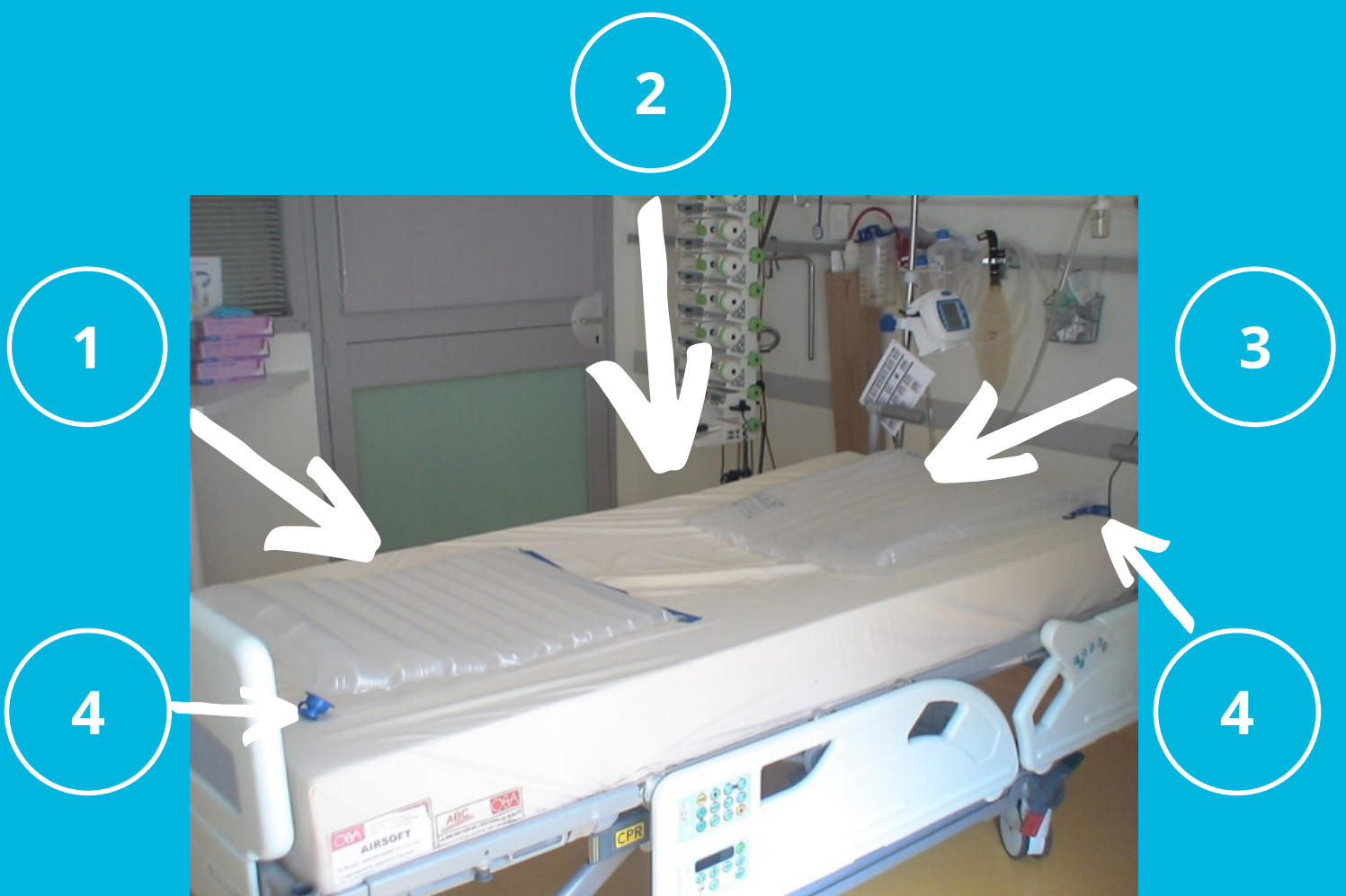

1

Cojín-cuña Repose® Alivio de talón, refuerzo pie / rodilla colocado en la parte inferior de la cama.

2

Dispositivo Repose® Sobrecolchón, refuerzo para la protección de las zonas de alto riesgo de producirse úlceras por presión.

3

Cojín facial Repose® Babytherm, refuerzo cara / tórax colocado en la parte superior de la cama.

4

Ponga el dispositivo Repose® de manera que la válvula quede debajo y alejada del paciente.

MÁS INFORMACIÓN

WWW.REPOSE.ES

CINS-Repose 948 24 23 08 - 672 72 28 48